


Anleitung „Wechsel Endschalter“ MIGUN-Gesundheits-Massage-Liege

1. Öffnen der Lederhülle der Kopfmatte oder der Fussmatte (je nach Defekt)
2. Gelbes Netz auf beiden Seiten lösen (muss nicht ganz entfernt werden)
3. Beginnen auf der freien, gegenüberliegenden Seite des Wagens mit den Jadesteinen (falls der Wagen in der Mitte steht, spielt es keine Rolle)

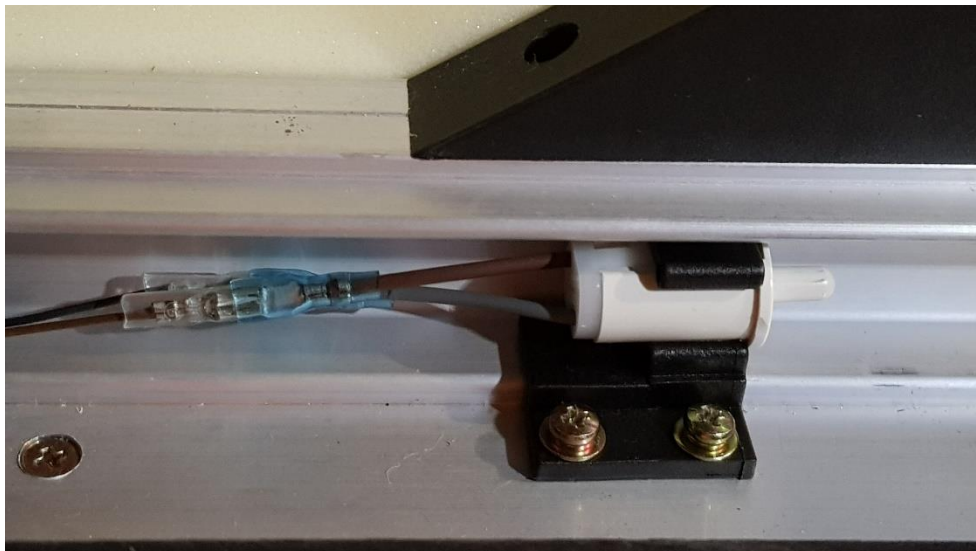

4. 2 Schrauben der schwarzen Halterung lösen
5. Endschalter aus der Halterung lösen und **vorsichtig** ausstecken
6. Neuen Endschalter **vorsichtig** wieder einstecken



7. Endschalter wieder in die Halterung einlegen und Halterung wieder anschrauben
8. Wenn der Wagen mit den Jadesteinen den 2. Endschalter verdeckt, MIGUN-Liege einschalten und warten bis der Wagen in die Mitte fährt und dann wieder stoppen (wenn er nicht automatisch fährt, einmal auf den gewechselten Endschalter drücken)
9. Danach gesamten Ablauf (4 – 7) auf der anderen Seite wiederholen
10. Netz wieder einhängen und Lederhülle schliessen FERTIG!!